




## Pen Needle Instructions for Use Instrucciones de uso de las agujas para pluma

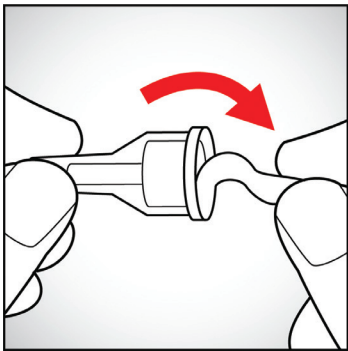


- 1** Remove the paper tab seal from the bottom of the pen needle.  
Quite la lengüeta de papel que sella la parte inferior de la aguja para pluma.

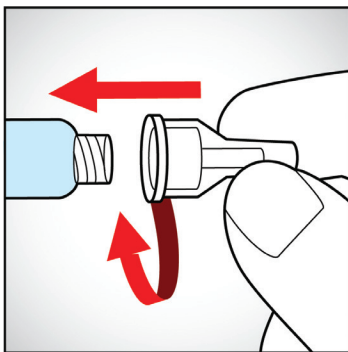

- 2** Push the pen needle straight onto the pen injector and twist until tight. Do not push at an angle.  
Empuje la aguja en línea recta sobre el inyector tipo pluma y enrósquela hasta que quede bien ajustada. No la empuje en ángulo.

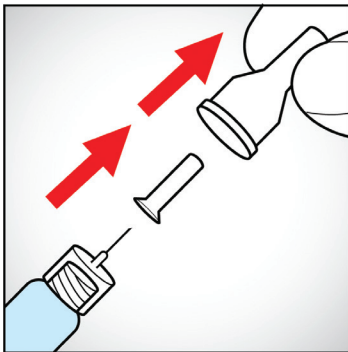

- 3** Remove the outer protective cap (white) and set aside. Remove the inner protective cap (colored) by pulling straight out to prevent bending of the needle.  
Quite la tapa protectora externa (blanca) y póngala a un lado. Quite la tapa protectora interna (coloreada) tirando de ella hacia fuera en línea recta para evitar que la aguja se doble.

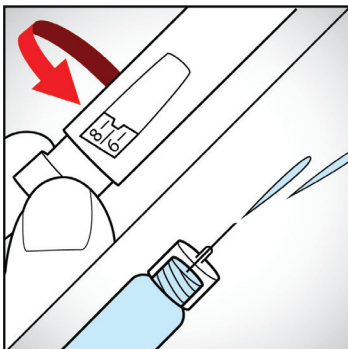

- 4** Prime the pen injector per the pen's instructions for use and set the required dose.  
Cebe el inyector tipo pluma según las respectivas instrucciones de uso y fije la dosis necesaria.