




## Insulin Syringe Instructions for Use Instrucciones de uso de las jeringas de insulina

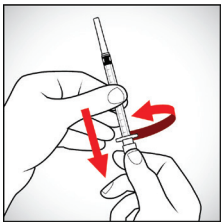


- 1** To expose plunger, remove the large white cap.  
Para poner el émbolo al descubierto, quite la tapa grande (blanca).

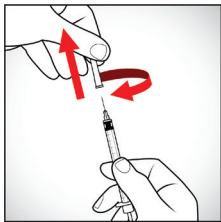


- 2** To expose the needle, remove the small orange protective cap by pulling straight out to prevent bending of the needle.  
Para poner la aguja al descubierto, quite la tapa protectora pequeña (anaranjada) tirando de ella hacia fuera en línea recta para evitar que la aguja se doble.

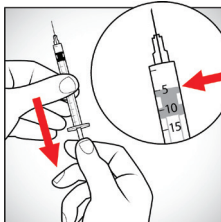


- 3** Pull the insulin syringe plunger down. Align the thin black line of the plunger (closest to the needle) with the desired number of units on the insulin syringe.  
Tire del émbolo de la jeringa hacia abajo. Alinee la línea negra fina del émbolo (la más cercana a la aguja) con el número deseado de unidades en la jeringa de insulina.

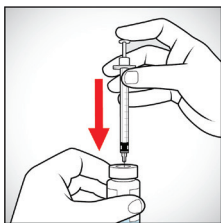

- 4** Push the needle straight through the center of the rubber top of the insulin bottle and push the plunger completely down.  
Empuje la jeringa en línea recta a través del centro del tapón de goma del frasco de insulina y empuje el émbolo totalmente hacia abajo.

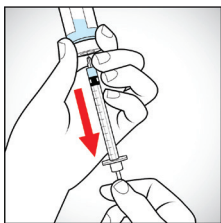

- 5** Leave the needle in the insulin bottle. Carefully turn the bottle and the insulin syringe upside down so the bottle is on top.  
Deje la aguja dentro del frasco de insulina. Invierta cuidadosamente el frasco y la jeringa de insulina (de modo que el frasco quede arriba).

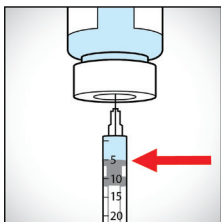

- 6** Pull the plunger down slowly. Align the thin black line of the plunger (closest to the needle) with the desired number of units on the insulin syringe.  
Tire lentamente del émbolo hacia abajo. Alinee la línea negra fina del émbolo (la más cercana a la aguja) con el número deseado de unidades en la jeringa de insulina.